



Istruzioni per l'installazione

Preparazione preliminare: utilizzare una chiavetta USB formattata a FAT32.


1. Scaricare l'aggiornamento software V01.09.00.22083 dall'area download del sito web scil: <https://www.scilvet.com/services/downloads>. Sarai ridiretto alla pagina web sulla quale è presente l'aggiornamento software.
2. Scorrere in basso lungo la pagina per trovare l'aggiornamento software per Element HT5+ e selezionarlo cliccandoci sopra.
3. Aprire la cartella V01.09 sulla nuova pagina web, selezionare il file update.tar.gz e cliccare sulla scritta "Download" nella parte alta della pagina.

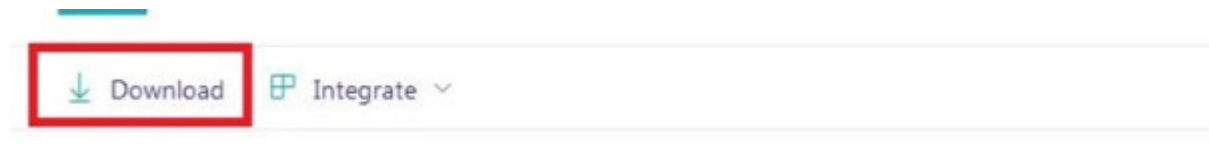

4. Apparirà la seguente finestra. Cliccare su "Download".

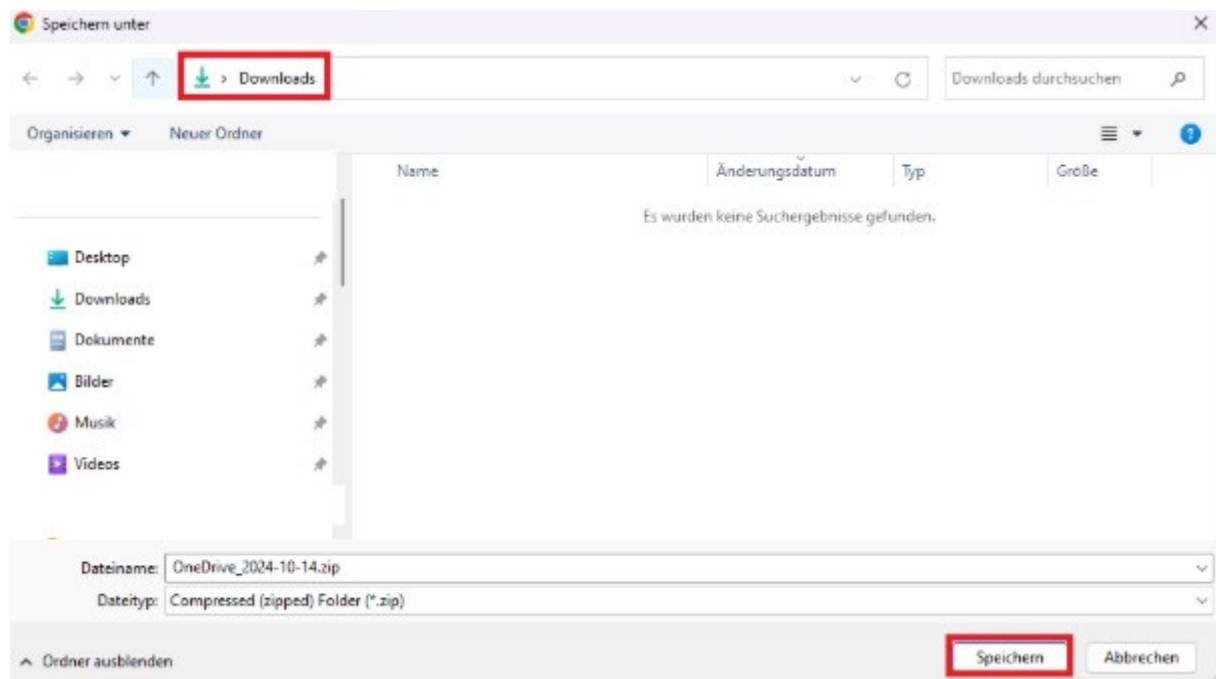

5. Il file verrà automaticamente salvato sulla cartella "Downloads" del tuo PC.

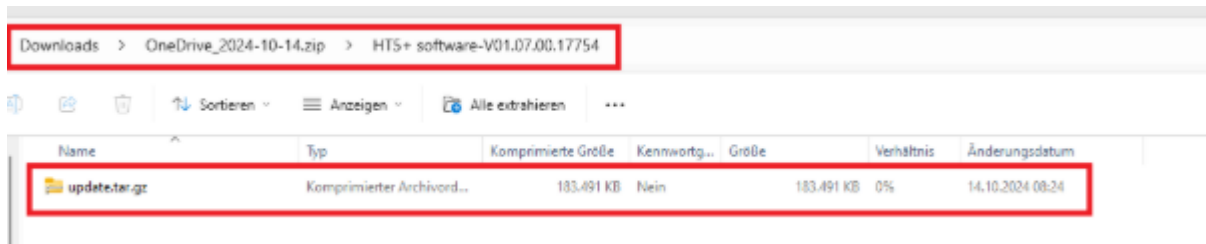


6. Inserire la chiavetta USB formattata e aprire la finestra corrispondente. Poi trascinare il file di aggiornamento update.tar.gz file dentro questa finestra (che corrisponde al contenuto della chiavetta USB).
7. Controllare che il file sia stato correttamente trasferito nella chiavetta USB. Importante: il file in formato zip non deve essere "spacchettato"!
8. Accendere l'analizzatore ed effettuare il login con le credenziali di Amministratore.


User name
Admin

Password
Admin


9. Inserire la chiavetta USB in una delle porte USB sul retro dello strumento.
10. Premere "Sì" quando compare la finestra di dialogo per l'aggiornamento.
11. Toccare "Upgrade" per avviare l'aggiornamento software.
12. Controllare che la versione del software mostrata sia quella corretta e poi selezionare "Sì".

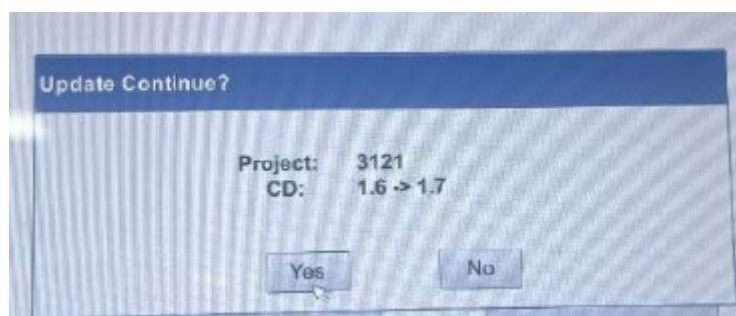

13. Quando l'installazione del software sarà terminata, premere "Ok".

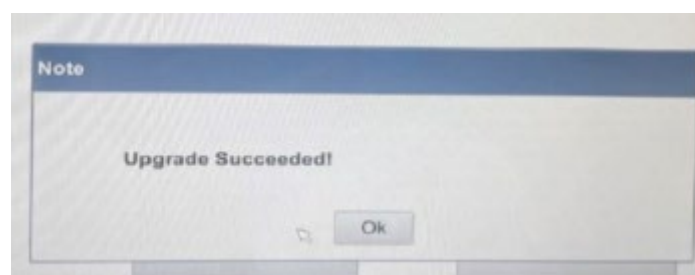

14. Spegnere l'analizzatore utilizzando l'interruttore O/1 sul retro. Poi riaccenderlo utilizzando lo stesso tasto. L'aggiornamento è completo.

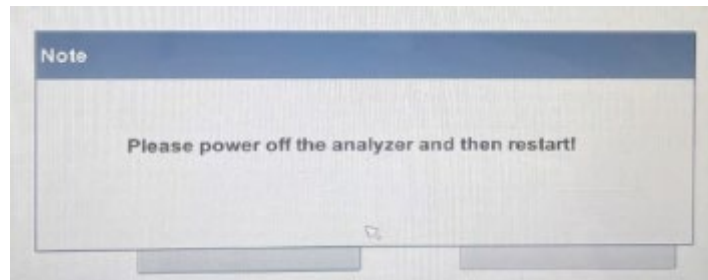

15. Controllare che l'aggiornamento sia stato installato correttamente:
 - Dopo l'aggiornamento e il riavvio dell'analizzatore, effettuare il login come Amministratore.
 - Premere "Menu" > "Status" > "Version Info."
 - Controllare che sia mostrata la versione software V01.08.00.19530.