



Istruzioni per l'installazione del software - Element i+

Per controllare la versione del Software:

1. Accendere l'analizzatore Element i+.
 2. Toccare l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra per accedere al menu "Impostazioni".
 3. Selezionare **VERSIONE SOFTWARE**.
 4. Verificare che la versione del software installata sia almeno la 1.2.0.1 prima di procedere con i passaggi successivi.
-

Istruzioni per l'aggiornamento:

1. Procurarsi una chiavetta USB ed accertarsi che non contenga al suo interno file denominati "Element i+". Se nella chiavetta sono salvati file di questo tipo, eliminarli o utilizzare un'altra chiavetta USB.
2. Inserire nel PC la chiavetta USB e collegarsi al sito <https://www.scilvet.com/services/downloads>
Cliccare sul link **Version 2.9.0**, poi sul link **UPDATE FILE**, e poi salvare il file **Element i+-update-2.9.0.tar.xz** sulla chiavetta USB confermando con **SAVE**. Rimuovere in sicurezza la chiavetta USB dal PC.

NOTA: Rimuovere ogni eventuale chiavetta USB già inserita nell'analizzatore prima di procedere con i passaggi successivi.

3. Inserire la chiavetta USB nell'apposito alloggiamento sul retro dell'analizzatore.
4. Toccare l'icona a forma di ingranaggio che si trova nell'angolo in alto a destra dello schermo per accedere al menu impostazioni.
5. Selezionare **AMMINISTRATORE** e inserire **Admin** sia come Username che come Password.
6. Confermare con il simbolo di "spunta" che si trova in alto a destra.

7. Toccare la scritta **AGGIORNAMENTI DI SISTEMA**.
8. L'analizzatore mostrerà sul display la scritta "Aggiornamenti disponibili sul drive USB" una volta che avrà individuato il file di aggiornamento contenuto all'interno della chiavetta USB. Se la chiavetta USB non viene riconosciuta, consultare la sezione dedicata alla risoluzione dei problemi.
9. Selezionare **AGGIORNA ORA** per avviare l'aggiornamento.

NOTA: l'installazione dell'aggiornamento v 2.9.0 durerà circa 10 minuti – **Non interrompere l'aggiornamento una volta iniziato!**

Toccare **SPEGNI** dopo che l'aggiornamento è stato completato. L'analizzatore si spegnerà automaticamente.

10. **Accendere** l'analizzatore premendo il pulsante posto in basso a sinistra sul retro.
11. Toccare l'icona a forma di ingranaggio posta nell'angolo in alto a destra dello schermo per accedere al menu impostazioni.
12. Selezionare **VERSIONE SOFTWARE** per avere conferma che il software sia aggiornato alla versione v 2.9.0.
13. Toccare l'icona "home" a forma di casa per tornare sulla schermata principale.
14. Congratulazioni, l'analizzatore è stato aggiornato con successo alla versione v 2.9.0!

Risoluzione dei problemi:

1. Assicurarsi che non siano presenti altre chiavette USB collegate all'analizzatore.
2. Toccare **CONTROLLA IL DRIVE USB** per far scansionare nuovamente dall'analizzatore il dispositivo **USB** alla ricerca di aggiornamenti.


3. Rimuovere la chiavetta USB ed inserirla in un ingresso USB diverso sul retro dell'analizzatore, poi selezionare **CONTROLLA IL DRIVE USB**.
4. Provare a copiare il file di aggiornamento su un'altra chiavetta USB che non contenga nessun altro file. Per i file di aggiornamento del software Element i+ è preferibile utilizzare chiavette USB di piccola capacità rispetto a quelle di grande capacità.

**** Nota Importante:**

Per le confezioni di T4 e Cortisolo che hai già ricevuto e che sono attualmente presenti nella tua scorta, ti preghiamo di scaricare e installare sul tuo dispositivo i file di calibrazione (CDF) aggiornati, che puoi trovare utilizzando il seguente link:

<https://heska.mbiodx.com/>

All'interno di questa pagina, clicca su **CALIBRATION FILES**, inserisci il numero di lotto della confezione in tuo possesso, poi clicca su **DOWNLOAD**.

Salva il file scaricato in una chiavetta USB vuota e installa il file di calibrazione sul tuo analizzatore nella modalità che sei solito utilizzare (inserisci una chiavetta USB - clicca su **IMPOSTAZIONI**  - clicca su **TIPI DI CARTUCCIA/LEGGI LE INFORMAZIONI DI CALIBRAZIONE**).