




## OPERAZIONI INIZIALI

- Preparare e colorare i vetrini.

Per informazioni specifiche sul campione consulta il Protocollo Fluidi di HeskaView Telectylogy.

- Assicurarsi che lo scanner per vetrini sia acceso e che il software HeskaView sia aperto sul desktop.

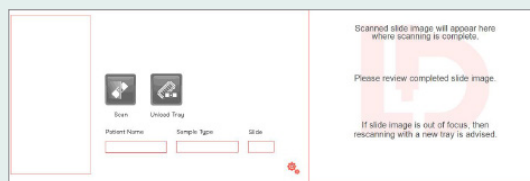


- Posizionare il vetrino nella cassetta, una volta asciugato, con la superficie colorata rivolta verso l'alto.

- Evitare di appoggiare le dita sull'area da scansionare

- Assicurarsi che le tre clip siano correttamente innestate per tenere in posizione il vetrino in corrispondenza di:


- fondo del vetrino
- lato destro del vetrino
- sopra i bordi satinati

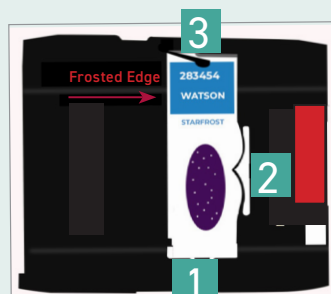


## CARICAMENTO CASSETTA/SCANSIONE

- Caricare la cassetta nello scanner per vetrini HeskaView.


- Prestare attenzione al corretto posizionamento, con il lato destro (2) rivolto verso l'alloggiamento della cassetta.

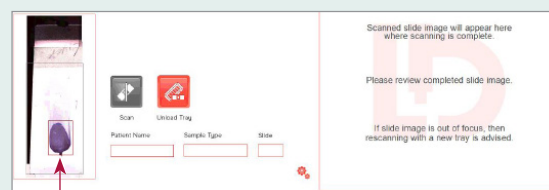

- Regolare l'area di scansione sull'immagine di anteprima facendo click e trascinando la casella rossa sull'area di interesse.

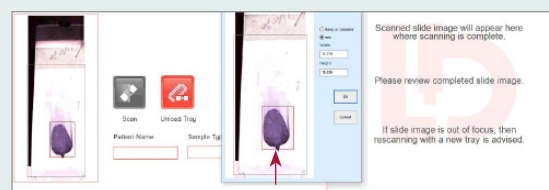


- Inserire il nome del paziente, il tipo di campione e il numero del vetrino, quindi fare clic su SCAN.

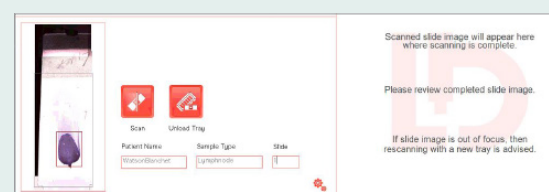


## DOPO LA SCANSIONE

- Dopo che il vetrino è stato scansionato, apparirà nella casella di visualizzazione a destra del software di scansione.
- Verificare che il campione sia adeguato e a fuoco.
- Allegare i vetrini al caso utilizzando il portale HeskaView e inviare.

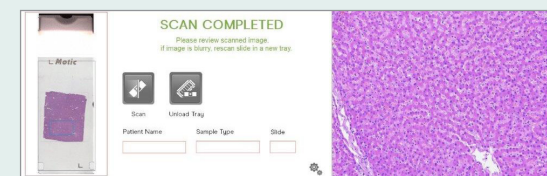

## INSERIRE L'ANAMNESI ED INVIARE LA SCANSIONE

- Accedere al portale HeskaView.
- Compilare i campi relativi alle informazioni sul paziente e sul caso

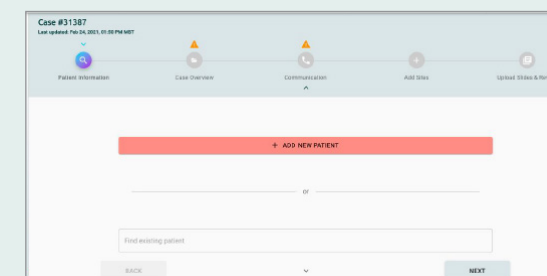

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### Tempo di scansione lungo

Se un tempo di scansione stimato sembra essere insolitamente lungo (ad esempio >40 minuti):

- Interrompere la scansione
- Posizionare il vetrino in un'altra cassetta
- Reinserire la cassetta e ripetere la scansione

### Errore avviso messa a fuoco

L'errore di avviso di messa a fuoco è progettato per interrompere l'invio di vetrini che sono stati scansionati mentre erano capovolti o nettamente inclinati.

- Posizionare il vetrino in un'altra cassetta
- Scansionare nuovamente



scil animal care company S.r.l.

Telefono: +39 0363 360656

E-mail: info-it@scilvet.com

scilvet.it