

Element AIM: istruzioni per l'aggiornamento

Se il tuo Element AIM è connesso ad internet, l'applicazione ti segnalerà che è disponibile un nuovo aggiornamento.



NOTA BENE: Se il sistema non è connesso a Internet, non riceverà l'aggiornamento automatico. Se non si è ricevuto un avviso di aggiornamento sull'app AIM, è sufficiente seguire la procedura descritta per collegare l'Element AIM alla rete e/o aggiornare il software manualmente.

Connessione WI FI del PC di Element AIM alla rete

Per uscire dal software AIM

- Cliccare sull'icona a ingranaggio
- Attivare la funzione amministratore
- Inserire l'**Username: AIM** e la **Password: AIM**
- Selezionare **About**
- Toccare **version** (non è un bottone, basta semplicemente toccare la scritta con il numero della versione) **Password: toodles**

NOTA BENE: Assicurati che la funzione "caps lock" (maiuscolo/minuscolo) sia disattivata!

- Selezionare **Administrator** sulla schermata Heska ed inserire la Password **Itadmin**, poi premere **enter**
- Toccare **Agree**
- Selezionare **Explorer**

NOTA BENE: Ora puoi accedere alle funzioni del PC e alla rete WI FI !


- Seleziona la rete WI FI per connetterti

Per tornare al software AIM dalla schermata Heska


- Cliccare in corrispondenza dell'angolo in basso a destra per tornare alla schermata del software AIM (il punto da cliccare si trova nell'angolo in basso a destra sullo schermo accanto all'area dove sono visualizzate data e ora).
- Cliccare sull'icona Heska Element AIM (cappello del Dr. Seuss).

Come aggiornare manualmente il Software

- Cliccare sull'icona a **ingranaggio delle impostazioni**
- Cliccare su **Administrator**
- Inserire l'**Username: AIM** e la **password: AIM**
- Cliccare su **Update Application**

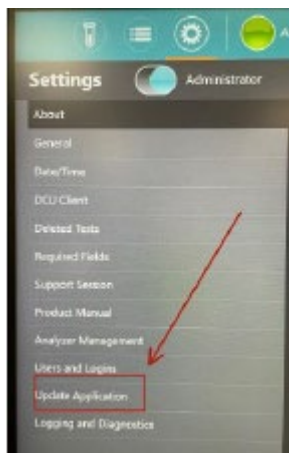

- Cliccare su **Update now**

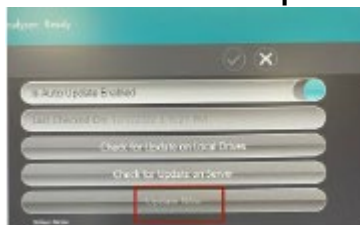

- Verrà visualizzato un avviso che indica che il processo richiederà circa 5 minuti.
- A seconda della velocità di Internet, entro pochi secondi o alcuni minuti verrà visualizzato un altro pop-up che chiederà l'autorizzazione a installare l'aggiornamento, cliccare **yes**.
- Con questo aggiornamento verrà visualizzato un secondo avviso che chiede il permesso di installare un secondo aggiornamento.

Antech Diagnostics Italy S.r.l.

Sede legale:
Via Rossaro, 11
24047 Treviglio (BG)
ITALIA

Tel. +39 0363 360656
Fax. +39 0363 64527
info-it@scilvet.com
www.scilvet.it

Reg. Imp. 167038/1997
C.C.IA.A n. REA 434167
P.IVA/Cod. Fis. 12143040157
Capitale Soc. EUR 110.000

Intestatarario conto corrente:
Antech Diagnostics Italy S.r.l.
IBAN IT67U050343280000000006840

- L'applicazione si riavvia una volta installati gli aggiornamenti. Element AIM si inizierà e, una volta tornato in modalità “**pronto**”, sarà nuovamente possibile analizzare i campioni.
- Cliccare nuovamente **yes**.

Antech Diagnostics Italy S.r.l.

Sede legale:
Via Rossaro, 11
24047 Treviso (BG)
ITALIA

Tel. +39 0363 360656
Fax. +39 0363 64527
info-it@scilvet.com
www.scilvet.it

Reg. Imp. 167038/1997
C.C.I.A.A n. REA 434167
P.IVA/Cod. Fis. 12143040157
Capitale Soc. EUR 110.000

Intestataro conto corrente:
Antech Diagnostics Italy S.r.l.
IBAN IT67U050343280000000006840