

Procedura Aggiornamento Software Element RC

Procurarsi una chiavetta USB **vuota**.

1. Utilizzare il seguente link: <https://www.scilvet.com/services/downloads>
2. Andare alla sezione Element RC e selezionare la versione software **1.00.01.45**
3. Verrai reindirizzato su un sito Web dove si trova l'aggiornamento del software.
4. Selezionare la cartella denominata "**upgradepackage**" e fare clic su "**Download**" nell'angolo in alto.



5. Copiare la cartella scaricata denominata "**upgradepackage**" sulla tua chiavetta USB.
6. Spegnerne l'analizzatore.
7. Inserire l'unità USB nella porta USB inferiore dell'Element RC.
8. Accendere l'analizzatore.
9. Seguire le istruzioni sullo schermo e confermare con **OK**.
10. Spegnerne Element RC dopo aver installato l'aggiornamento.
11. Togliere la chiavetta USB.
12. Accendere l'analizzatore: l'aggiornamento è completato.
13. Verificare la versione di aggiornamento sulla schermata principale dell'analizzatore.